

E-vet hæve-/sænkeborde

Brugermanual



Brugermanual – E-vet hæve-/sænkebord

Tillykke med dit nye **E-vet** hæve-/sænkebord.

Bordet er et nyudviklet, moderne, elektrisk drE-vet hæve-/sænkebord, der er beregnet til anvendelse indendørs i klinikker. Den tiltænkte brug er som højdejusterbart arbejdsbord, hvor højdejusteringen skal muliggøre varierende arbejdsstillinger og en ergonomisk forbedring af arbejdsforhold.

Gennemlæs venligst omhyggeligt hele brugermanualen før bordet tages i brug. Vær opmærksom på forbud og advarsler samt de ergonomiske råd. Brugermanualen skal følge bordet!

Bordets virkemåde

Bordets højdebevægelse drives vha. en elektrisk drE-vet spindel. Spindelen igangsættes via en kontrolboks, som er forbundet med et beskyttet fodpanel. Kontrolboksen har indbygget overbelastningssikring, som sikrer at bordets op/ned funktion afbrydes, hvis bordet overbelastes. Der er indbygget opladeligt batteri i kontrolboksen/motoren således, at bordet kan anvendes uden direkte strømforsyning.

Inden bordet tages i brug

Sørg for at batteriet oplades i mindst 24 timer inden bordet tages i brug.

Betjening

Hæve-/sænkebordet kan kun betjenes fra fodkontakten. **Fodkontakten skal altid være placeret på gulvet ved betjening.** Fodkontakten har op- og ned-funktion, og bevæger sig kun så længe kontakten holdes nede.

Vedligehold

Bordet er som sådan vedligeholdelsesfrit, dog kan delene aftørres med en hårdt opvredet klud i mild sæbevand. Borde med gummiplade har ved levering en mat/hvid overflade, den matte overflade skyldes talkum der beskytter bordpladen under produktion. Talkumlaget fjernes ved aftørring i mild sæbevand, efterfølgende kan påføres olie (madolie) hvorefter bordpladen vil fremstå sort. Der kan ikke foretages rengøring af de indre dele. Der må under ingen omstændigheder komme rengøringsmidler i de elektriske dele. Der må ikke sprøjtes/smøres olie på søjlerne, da dette ødelægger fremføringsmekanismen.

Opstilling

Bordet skal opstilles på et plant og fast underlag. Bordet køres herefter op, således at der bliver plads til montering af en eventuel kabelbakke. Bordet er nu klart til brug.

Flytning

Inden flytning køres bordet i bundstilling og ledningstilslutninger fjernes. Opstillingsproceduren gentages ved opstilling det nye sted. Ved længere flytninger samt opbevaring på lager, kan bordet skilles ad i stel og bordplade. Husk da, at beskytte stel og bordplade mod skrammer m.v. og at opbevare skruerne omhyggeligt og afmærket.

Ergonomi

- Ved ibrugtagning af et nyt hæve-/sænkebord, anbefales det at afprøve, om bordet let og ubesværet kan indstilles trinløst i hele løfteintervallet.
- Husk løbende at skifte arbejdsstilling. Prøv jævnligt at hæve eller sænke bordet med blot et par cm. Variation er nøglen til at minimere belastningsskader.
- Varier siddehøjden fra siddestillingen med vandrette lår, til den højere siddestilling med skråtstillet stolesæde, skrånende lår og åben hoftevinkel.
- Brug gerne en stol, der har trinløst sædevip, så inspireres du til at vippe på stolen, hvilket bl.a. medvirker til at reducere risikoen for diskusprolaps.
- Husk at den stående stilling aflaster ryggen i forhold til den siddende stilling.

Forbud, advarsler og råd

Al uagtsomhed omkring montage, sikkerheds- og brugsanvisninger i forbindelse med brugen af hæve-/sænkebordet kan føre til alvorlig personskade!

- Hæve-/sænkebordet må ikke anvendes til personløft.
- Hæve-/sænkebordet må ikke stå skråt eller ustabilt. Bring bordet i plan med de monterede stilleskruer på bordfødderne, hvis ikke underlaget er plant.
- Børn må ikke færdes ved og omkring bordet, heller ikke når strømmen er demonteret.
- Forsyningsledningen må ikke beskadiges eller komme i klemme!
- Vær opmærksom på risikoen for klemning i forbindelse med bordets højdebevægelse. Specielt under bordet (tværsarg og evt. rullemøbler) og langs kanten af bordpladen (f.eks. reoler, vindueskarme og andre tilstødende borde).
- Hele bordpladen skal placeres frit, minimum 25 mm fra reoler, vindueskarme, andre borde og lignende elementer.
- Vær opmærksom på advarselsklistermærkerne på bordet. Hvor disse er placeret skal legemsdele fjernes ved betjening af bordet.
- Der skal slukkes på stikkontakten (f.eks. om natten), hvis strømforbruget skal minimeres.

Reparation

Reparation skal udføres af autoriseret personale, idet bordet ikke indeholder dele, som brugeren selv kan reparere! Kontakt derfor E-vet ved reparationer.

Garanti

Der ydes 1 års reklamationsret på E-vet-bordserien, der omfatter fabrikations- og materialefejl, som konstateres ved normalt brug af hæve-/sænkebordet. Reklamationsretten omfatter ikke fejl, skader eller slidtage, som direkte eller indirekte er opstået som følge af forkert opstilling, betjening eller uautoriserede indgreb udover det beskrevne i denne brugermanual.

Bortskaffelse

Bordet skal ved kassation nedbrydes på følgende måde:

- Gummeplade til forbrænding/modtageordning
- Bordplade til metalgenbrug/modtageordning
- Metalstel til metalgenbrug/modtageordning
- Elektronik til modtageordning for elektronik

Tekniske specifikationer

Mål: 60 x 119 cm.

Vægt: 42 kg (ekskl. bordplade)

Tilslutning: 230 V, 50 Hz via lader.

Bordets drift: Via 12V opladeligt batteri

Drivdel: Stænktæt

Effektforbrug: Ved maksimal belastning 2 x 140 watt

Stand by forbrug: 2,5 w

Belastning: Maximalt 80 kg løftekapacitet ved en ligelig fordeling af belastningen på bordplade/bordstel.

Højdevariation: 28-110 cm.

Hastighed: 50 mm/s uden belastning.

Fejlfindingsskema for hæve-/sænkebord

Bordet reagerer ikke:

- Tjek tilslutning til stikkontakt – er der tændt?
- Tjek at netledning er sat i stikket på kontrolboksen
- Tjek at ledninger fra kontrolboksen er forbundet
- Tjek at ledninger fra betjeningsenhed er forbundet
- Tjek at stikkene er monteret helt i bund
- Tjek at ingen ledninger er klippet over eller afbrudt
- Tjek at lysnetsikringer er OK
- Kontakt evt. E-vet A/S for service (tlf +45 7453 0848)

Bordet kører ukontrollabelt:

- Sluk på stikkontakten eller tag stikket ud. Tænd for strømmen igen. Ved forsat fejl kontakt E-vet A/S.

Bordet løfter skævt:

- Bordet står ikke længere plant

Bordet støjer unormalt:

- Tjek at bordet ikke skraber mod andre borde/elementer
- Lyt efter om støjen kommer fra bordsøjlen eller kontrolboksen. Hvis ja, afbryd strømmen og kontakt venligst E-vet A/S.

Akustisk signal fra lader:

- Batteriet skal oplades med 220V netstik

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer herved på eget ansvar, at E-vet **hæve-/sænkeborde** som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver og andre normative dokumenter:

- Rådets direktiver 98/37/EF
- Rådets direktiver 89/336/EØF ("EMC-direktivet") med senere ændringer
- Rådets direktiver 73/23/EØF med senere ændringer

Med hensyn til "Maskindirektivet" (98/37/EF) skal vi gøre opmærksom på, at

- Hæve-/sænkebordet betragtes som en maskine.
- Hæve-/sænkebordet først må tages i brug, når det er monteret og installeret i overensstemmelse med forskrifterne i denne brugermanual.

E-vet A/S ønsker dig god arbejdslyst!

Ole Rømersvej 26A,

6100 Haderslev,

www.E-vet.dk

salg@email.dk

Tlf. +45 7453 0848

Fax: +45 7453 0804