

KATKOR

Instruktioner

- 1** Rengør kattebakken grundigt. Skyl den dernæst grundigt med rent, lunkent vand, så der ikke efterlades rester af rengøringsmidler eller blegevand. Tør dernæst kattebakken af med køkkenrulle- eller toiletpapir.
- 2** Strø Katkor ud midt i bakken. Sæt bakken tilbage på det sted, hvor katten er vant til at bruge den.
- 3** Hvis katten producerer fæces før end den producerer urin, skal fæces fjernes så hurtigt som muligt, så kontamination med den urin, der skal opsamles, undgås.
- 4** Urinen skal opsamles snarest muligt efter, at katten har urineret. Med henblik på opsamling holdes bakken skråt i forhold til et hjørne, den medfølgende pipette stikkes ned i bakkens laveste punkt og urinen suges op.
- 5** Den opsugede urin skal anbringes i det medfølgende opsamlingsglas og hurtigst muligt afleveres til dyrlægen. Der er vigtigt, fordi urinens sammensætning og krystallernes form ændrer sig, hvis urinen opbevares i længere tid.
- 6** Det kan ske, at en kat ikke er tilfreds med mængden af grus. Du kan så anbringe to lommer med Katkor. Den mængde, der anbringes i lommen vil være et kompromis mellem den mængde, som uden problemer får katten til at sætte sig på bakken, og den mængde hvorved urinen bedst kan adskilles fra gruset. I de fleste tilfælde kræves der kun 1-2 ml urin til de ønskede undersøgelser.
Fra en lomme med Katkor opnås der en opsamlet mængde urin på 7 ml urin pr. 10 ml urin, som katten har afgivet. Katten producerer i almindelighed fra 35 - 80 ml (på tørfoder) til 80-120 ml (litteratur) urin pr. døgn, så det vil i de fleste tilfælde ikke være noget problem at opsamle tilstrækkelig urin. Kun i tilfælde af en blærebetændelse producerer katten kun nogle få dråber urin ad gangen. I så tilfælde vil der dog efter et stykke tid (læ 2 timer) sandsynligvis være samlet tilstrækkelig urin. Her må man ikke i mellemtiden opbevare den allerede opsamlede urin i køleskabet, fordi der så kan ske udkrystallisering.
- 7** Hvis katten ikke vil sætte sig på bakken med katkor, kan man lægge almindeligt kattegrus i et hjørne af bakken. Så vil den vante lugt være til stede. Det er her meget vigtigt at passe på, at urinprøven ikke bliver forurenset af det almindelige kattegrus. Eftersom risikoen for forurening alligevel er til stede, bør man kun bruge denne metode i yderste nødsfald.

