

Tatoveringsmaskine

Brugsanvisning

Denne maskine er udviklet til at tatovere små dyr ved hjælp af en multi- eller en enkeltnål.

Tatoveringsmaskinen er støjfri, let (produktet er fremstillet i aluminium) stærkt og nemt at håndtere.

Maskinen leveres i en æske med multi- og en enkeltnål samt en 10 ml flaske med sort blæk.

Tatoveringsmaskinen arbejder med en motor, som sikrer en regelmæssig vibration. Denne opbygning af maskinen betyder at den både kan køre på batteri eller net strøm. Tatoveringsmaskinen giver en perfekt penetration.

Til maskinen hører en 230 volt/50 hertz transformer, Yderligere kan den køre på batteri, tre stk. AA. 1,5 volt batterier (LR6 alkaline).

Tatoveringspennen tændes og afbrydes med den parallelle pal på motoren (29) .

Tatoveringsmaskinen kan bruges til tatovering af små dyr, som regel i øret eller på indersiden af benet, Heste tatoveres som regel på indersiden af en hests læbe.

Vi anbefaler, at man barberer og rengør den del af kroppen, som skal tatoveres, med sprit og derefter aftørre det med en klud.

Ibrugtagning.

Kom enden af pennen ned i blækket og tænd maskinen kort, så den suger blæk op i nålens beskyttelseshætte (12).

Rengør med et tørt kompres efter hver inskription.

Lad være med at bruge nogen form for antiseptisk middel.

- *Multinål (bestående af 6 nåle):*

Denne nål bruges normalt til at tatovere den øverste del af benet.

Skrue nålens beskyttelseshætte (12) ned eller af mens maskinen er tændt for at regulere nålens længde til ½ -1 mm.

Hvis nålen bliver for lang tages nålens hætte (12) af og justeringsanordningen skiftes tilbage til den oprindelige indstilling eller udskiftes om nødvendigt.

Stræk huden mellem tommel- og pegefinger og påbegynd tatoveringen mens pennen holdes vinkelret og beskyttelseshætten (12) er i kontakt med huden. Skriv så langsomt som muligt tegn for tegn uden at fjerne pennen fra huden.

- *Enkeltnål:*

Denne nål kan bruges til at lave tyndere og mindre tatoveringer på øret eller benet.

Med denne nål kan man således tatovere katte og hunde tæt ved cochlea i øret.

e-vet®

Ole Rømers Vej 26 A
DK-6100 Haderslev

Tlf. +45 74 53 03 48
Fax +45 74 53 03 04

Når du skal tatovere øret, skal du regulere nålens længde til mindst 1 mm ved at skrue beskyttelseshætten af. Glat huden ud med din handskebeklædte tommelfinger for at fjerne ujævnheder, som kan få nålen til at smutte.

For at få tynde tatoveringer, som ikke bløder så meget og undgå rifter skal du strække ud i øret og tatovere i en 30 eller 45 grader vinkel, mens du presser let uden at beskyttelseshætten kommer i kontakt med huden.

Denne fremgangsmåde er kun mulig med en enkeltnål: den gør det nemmere at føre pennen og rette eventuelle fejl. Man skal dog alligevel bestræbe sig på at lave inskriptionen i en køre. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal du bruge en lup (4 dioptri), så du er sikker på, at du fortsætter præcis, hvor du slap.

Når du tatoverer benet skal nålen næsten ikke komme ud fra yderpunktet/være synlig?. Du vurderer hvor meget du skal trykke ud fra hudens tykkelse.

Selvom det er muligt at lave tyde bogstaver, skal du passe på ikke at komme til at tegne dem for tynde, da det varierer fra dyr til dyr, hvor meget blækket "løber" under huden. Inskriptionerne kan blive tykkere og svære at læse ved nogle dyr. Undlad også at skrive dobbelt af samme grund.

Det er nødvendigt at massere huden med basisk kortikoid og fugtgivende crème for at undgå infektion og for at såret kan hele hurtigt. Der dannes en sårskorpe, som falder af efter et par dage.

Håndgrebet kan afmonteres og steriliseres ved hjælp af en autoklave.

Sådan udskifter du nålen:

Skrue først nålens beskyttelseshætte (12) af og dernæst møtrikken til nåleholderen (3), mens du holder nåleholderen (3) med den specielle skruenøgle.

Træk i nålen med hånden eller med en lille nip tang. Erstat den gamle nål med en ny og skub den langt ind i nåleholderen.

Skrue møtrikken (3) fast igen med hånden og spænd efter med skruenøglen (25). Sæt langsomt beskyttelseshætten (12) på plads, så du ikke ødelægger nålen.

Vedligehold.

Det er kun tatoveringsmaskinens nåle og justeringsanordning skal vedligeholdes.

Dyp enden af pennen inkl. beskyttelseshætten i alkohol efter brug, mens maskinen stadig er tændt. På denne måde kommer der alkohol ind i nåleholderen, så man undgår, at blækpartiklerne sætter sig fast. Skru derefter nålens beskyttelseshætte (12) af og gør rengøringen færdig.

Justeringsanordningen skal erstattes så snart den mister sin elasticitet eller mindst en gang om året.

Man kan ikke skille transformeren og pennen fra hinanden.

Stikket fra transformeren skal sættes i en stikkontakt, som er forsvarligt beskyttet.

Tag batterierne ud af maskinen, når den ikke er i brug. Tjek jævnligt batterierne.

Servicegaranti.

Der ydes 1 års garanti for fabrikationsfejl, slid er ikke omfattet af garantien.