

**Vejledende flow ved brug af Matrx anæstesiapparat.**

***Ved start:***

| Bain system                | Cirkel system                |
|----------------------------|------------------------------|
| Tilledning af ilt          | Tilledning af ilt            |
| Mindst 1,5 l/min. i 5 min. | Mindst 2.2l/min i 10-15 min. |

**Vejledende flow ved brug af Matrx anæstesiapparat.**

***Vedligehold ( efter 10-15 min)***

| Patient vægt | Bain System<br>Ilt pr min. | Cirkel system | Respirationspose<br>størrelse |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 kg         | 500 ml                     |               | 500 ml                        |
| 2 kg         | 600 ml                     |               | 500 ml                        |
| 3 kg         | 900 ml                     |               | 500 ml                        |
| 4 kg         | 1200 ml                    |               | 500 ml                        |
| 5 kg         | 1500 ml                    | 500 ml        | 500 ml                        |
| 7,5 kg       |                            | 750 ml        | 1 l                           |
| 10 kg        |                            | 1000 ml       | 1 l                           |
| 15 kg        |                            | 1500 ml       | 1 l                           |
| 20 kg        |                            | 2000 ml       | 2 l                           |
| 25 kg        |                            | 2500 ml       | 2 l                           |
| 30 kg        |                            | 3000 ml       | 3 l                           |
| 40 kg        |                            | 4000 ml       | 3 l                           |
| 50 kg        |                            | 5000 ml       | 5 l                           |
|              |                            |               |                               |
|              |                            |               |                               |
|              |                            |               |                               |

## Trykafprøvning

### Foretages før brug.

1.

*Luk APL ventil ( drej den med uret)*

2.

*Sæt tommelfinger over Y slangen ( forbindelsesleddet til tubus)*

3.

*Åben flowmeter, og lad manometret vise 30cm H<sub>2</sub>O,*

4.

*Luk for flowmeter når manometret har nået et tryk på 30 cm H<sub>2</sub>O*

5.

*Systemet bør nu kunne holde trykket i min 1 min, såfremt der skal tilledes mere end 200 ml for at holde trykket skal der søges lækage.*